

# PROTECTION SET

**A-Z**  
be Your Best Partner  
株式会社 **A-Z** ゼット


**SWOTO**  
圣华盾

**S30010** プロテクションセット：防護服タイプ（テープあり）

**S30030** プロテクションセット：防護服タイプ（テープなし）


## 装着方法

PE+PPの二層構造。通気透過膜複合技術を採用して、細菌と血液を遮断。感染防止、防水防汚、静電気防止の優れた性能を持つ。医療機器のラミネート圧着機を使って、ラミネート加工を行っています。密着が良い製品です。

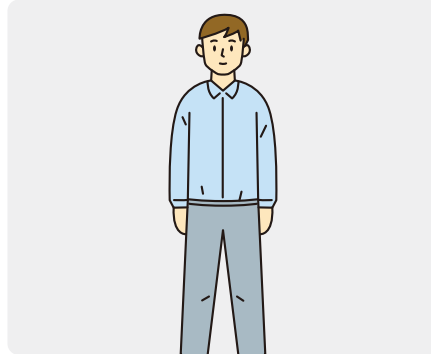


### 1 服装

動きやすい服装にします。

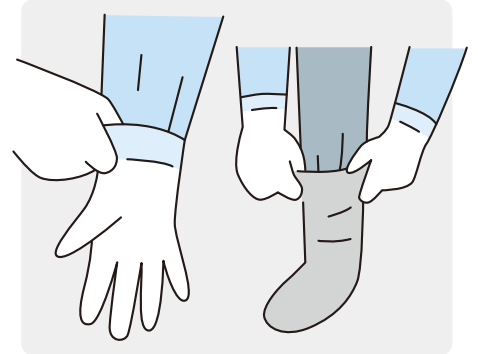

### 2 グローブ(白)の装着

グローブ(白)を袖口を覆うように装着します。履いている靴下はズボンの上に被せてください。

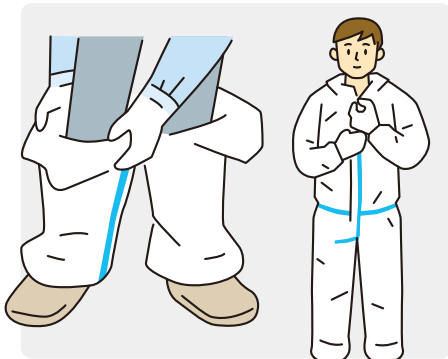

### 3 防護服の着用

両足、両腕を通し、首の下あたりまでファスナーを閉めます。




### 4 シューズカバーの着用

シューズカバーは防護服の裾を覆うように装着します。




### 5 マスク、ゴーグルの装着

マスクは隙間のないように装着します。  
※フィットテストは必ず行いましょう。  
ゴーグルはゴムバンド調節後、装着します。

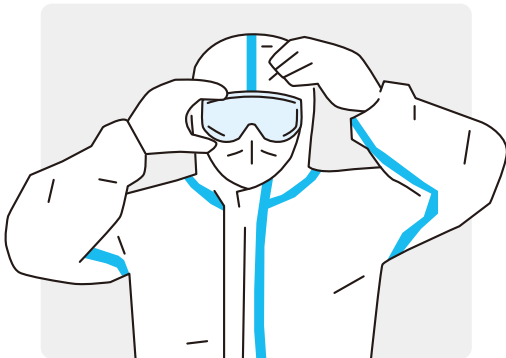

### 6 防護服のフードを被る

髪の毛が出ないように深く被り、あごの下までファスナーをしっかりと上げます。  
ファスナーを密着するようにファスナーカバーを口元部分まで貼り付けます。

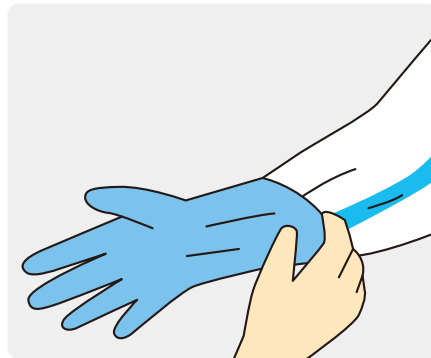

### 7 グローブ(青)の装着

グローブ(青)を防護服の袖を覆うように深くはめます。




### 8 完了

# 脱衣方法



## 1 事前準備

シューズカバー、グローブ(青)の消毒を行います。

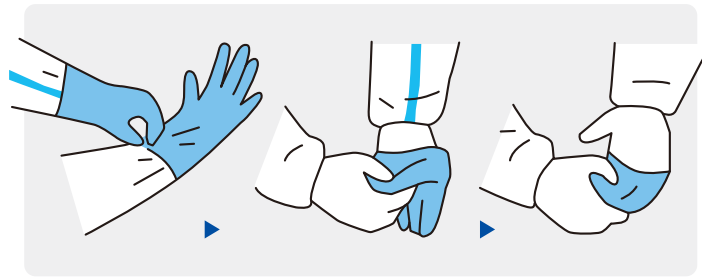

## 2 グローブ(青)を外す

片方のグローブを裏返ししながら外します。裏返ったグローブで、もう一方のグローブをつかみ、同様に裏返ししながら外します。

※グローブを外す際に「パチン」と音を立てないように静かに外します。

## 3 防護服を脱ぐ




### 3-1

ファスナーを一番下まで下ろし、皮膚や毛髪に触れないようフードを外します。



### 3-2

介助者の手を借りて、肩から脱ぎます。

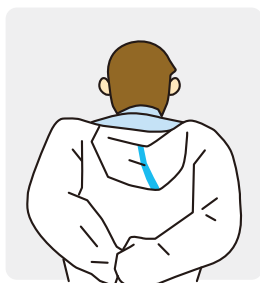

### 3-3

手を袖の中に入れて、後手に片方の手を脱ぎます。



### 3-4

もう片方を脱ぎます。



※腕を交差させるとウイルスが衣服に付着する可能性があります。



### 3-5

表を内側に丸め込むように脱ぎ、シューズカバーも一緒に外します。  
※グローブ(白)はまだ外さないで下さい。




## 4 ゴーグルを外す

衣服に外側の面が触れないように、注意して外します。




## 5 マスクを外す

下のひもから外し、次に上のひもを外します。  
※マスクの表面に触れないよう注意してください。

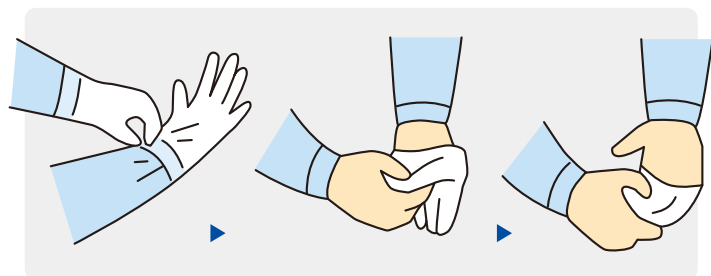

## 6 グローブ(白)を外す

表面を消毒し、2のグローブ(青)と同様の方法で裏返ししながら外します。

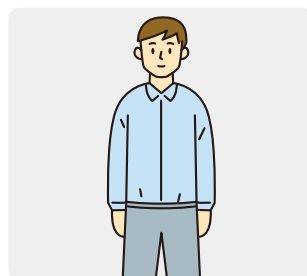

## 7 完了

# PROTECTION SET

S30010 S30030

※イラストはイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。また本商品の仕様は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承をお願いいたします。