


マスクの装着方法

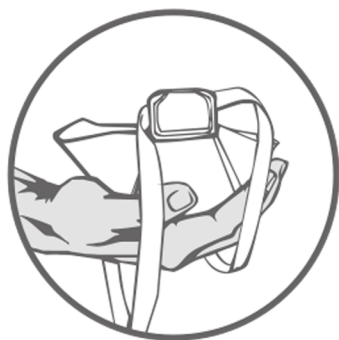

STEP 1

ノーズワイヤーが上側にくるように持ち、写真の通りに、マスクとゴム2本の間に通し、ゴムが垂れるようにします。



STEP 2

マスクを広げ、鼻と顎を覆い、マスクを押さえながら、下ゴムバンドを耳の下へ、上ゴムバンドを頭頂部につけます。両手でノーズワイヤが鼻に密着するように軽く押します。



STEP 3

密着性確認

a)両手でマスクを押さえます。

b)息を吸ったり、吐いたりします。

空気が漏れている場合、もう一度鼻当てやゴムバンドを調整して、密着の良い位置にマスクを合わせます。

STEP 4

装着説明に従って正しくマスクを装着してください。

【必要な製品保管条件】:温度-5℃～+50℃の間、相対湿度75%以下で保管し、開封せずとする。